



Portatif Fleksible Endoskopik Yutma Değerlendirme Sistemi

ÜRÜNLER



ENDOSKOP

Endoskop kalınlığı yuvarlak uçlu 3.4 mm dış çapa sahiptir ve distal ucu sadece 3.0 mm'dir. Hasta konforu ve kolay geçişler için özel olarak tasarlanmıştır. Dar çaplı kullanım kolaylığı sağlarken görüntü kalitesinden ödün vermez. 18.000 fiber sayesinde daha kalın endoskop sistemlerinden bile daha kaliteli görüntü sağlar. İnce yapısının faydası uzun FEES testlerinde ortaya çıkmakta ve sağlık profesyonellerine yumuşak geçişler sağlamaktadır. Pediatri için özelleştirilmiş endoskobu sadece 2.8 mm kalınlığındadır.



M-CAM

ImagePro USB

KAMERA

PatCom doğru uygulama için doğru kamerayı sunar. Hafif ImagePro USB, disfaji teşhisine odaklanan mobil FEES sağlayıcıları için mükemmel bir seçimdir. HD çözünürlük ideal pozlama ayarlarıyla eşleştirilir, böylece beyaz çıktıktan sonra bir kare kaçırmaz. Global shutter teknolojisine sahip M-CAME, video stroboskopi yaparken net, iz içermeyen bir görüntü sağlarken FEES uygulamasını mükemmel bir şekilde kapsar.




IŞIK KAYNAĞI

Taşınabilir, pille çalışan ışık meşalesi, denkleme sınıfının en iyisi LED teknolojisi ile dengelenmiş gün ışığı sağlar. Ayarlanabilir ışık yoğunluğu, FEES testi sırasında herhangi bir duruma uyum sağlayabilir. Ayrıca, el feneri, endoskopiste ekipmanı rahat ve güvenli bir şekilde tutması için toplam 3 bağlantı noktası sağlayan bir tutamak işlevi görür.

YAZILIM

Sağlık profesyonelleri FEES testi sırasında diğer komponentlerden daha fazla yazılım ile zaman geçirirler. Video inceleme kalitesi ve FEES raporlaması sırasında yazılımın yeteneği genellikle göz ardı edilir. Patcom Yazılımı video ve ses kaydı, hızlı ileri geri oynatma, çift yönlü ağır çekim ve kare kare incelemeye olanak tanır. Sağlık kuruluşuna göre özelleştirilebilir FEES raporuna, endoskopi görüntülerinden alınan kareleri yerleştirebilirsiniz. DICOM üzerinden EMR entegrasyonu mümkündür.

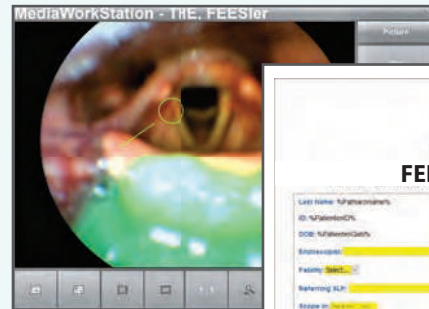

KONFIGÜRASYON



Portatif PatCom FEES sistemi, mobil FEES sağlayıcıları için ve yatarak ya da ayakta tedavi ayarları arasında gidip gelmek için mükemmel bir yapılandırmadır.

Toplam ağırlığı sadece 5.2 kilogram olan bu kurulum, bugün mevcut olan en kolay taşınabilir, eksiksiz FEES sistemidir. Gün boyunca birden fazla tesise taşınma hızlı, kolaydır ve hastalara en iyi klinik hizmeti sunarken verimliliği artırmaya olanak tanır.

TEMİZLİK



1. ADIM

Endoskopi için akan suyun altında (su içme suyu kalitesinde olmalı) kalıntılardan tamamen arındırılincaya kadar temizleyin.



2. ADIM

Endoskopi için tek kullanımlık temiz bir bezle veya enzimatik deterjanla ıslatılmış süngerle silin.



3. ADIM

Endoskopi için deterjandan arındırılincaya kadar akan su altında tekrar durulayın.



4. ADIM

Ekleme kısmını üst düzey dezenfektana batırın. Uygun daldırma süresi için üreticinin yönergelerine uyun.



5. ADIM

Tüm HLD endoskoptan çıkarılincaya kadar endoskopi için akan su altında (içme kalitesi) durulayın.

PatCom endoskopları Cidex OPA & Revital OX Resert yüksek seviye dezenfektanlarla kullanım için onaylanmıştır.

SERVİS

PatCom Medical A.Ş. sektördeki diğerlerinden daha üstün bir düzeyde müşteri hizmeti sunma taahhüdü ile kurulmuştur. PatCom, yutma, ses ve refleks alanındaki enstrümantal değerlendirmeler söz konusu olduğunda uygulama uzmanıdır.

Konuşma Dili Patologlarının karşılaştığı benzersiz zorlukları anlıyoruz. FEES programınızı başlatma ve çalıştırma sürecinde size destek olacağız ve daha sonra desteğimize ihtiyaç duyduğunuzda her gün yanınızda olacağız.

Onarım sırasında ücretsiz krediler sunuyoruz ve ekipmanınızın işini yaptığından emin olmak için 7/24 hizmet veriyoruz. Entegre FEES raporlama araçlarımızı sürekli iyileştirmek için çalışıyoruz ve geliştirdiğimiz güncellemeler sisteminizde ücretsiz olarak uygulanacaktır. Yazılımla ilgili sorunları birkaç dakika içinde çözmek için FEES sisteminizin bilgisayarını kontrol altına alabildiğimiz ücretsiz uzaktan erişim hizmeti sunuyoruz.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en iyi SLP eğitimcileriyle yakın işbirliği içinde çalıştığımız için, doğru temel FEES kursundan yetkinlik eğitimine kadar eğitimlerle sizi destekliyoruz.



PATCOM HAKKINDA



Misyonumuz;

Yerleşik tıbbi prosedürleri hastalar ve sağlık profesyonelleri için daha konforlu hale getirerek insan refahını iyileştirmek.

PatCom Medical, farinks, larinks ve özofagusa erişen prosedürler sırasında hasta konforunu iyileştirme temeli üzerine kurulmuştur. Sistemlerimiz, iletişim ve yutma bozukluklarını tedavi etmek ve değerlendirmek için konforlu ve güvenilir bir araç sağlar.

PatCom Medical, müşteri hizmetleri standardını yeni bir seviyeye yükseltmeyi hedefliyor. Klinik dilinizi konuşabilen ve üstesinden gelmeniz gereken engelleri bilen birine sahip olduğunuzu hayal edin. O "kişi" PatCom'da senin takımında!